



ÖREBRO

## Checklista till förskrivare vid information om personlyft

- Användande av lyft kräver bedömning av arbetsterapeut.
- Lyftselen ska alltid provas ut individuellt.
- Lyftens funktioner visas; Höj- och sänkning, breddning, nödstopp, nödsänkning, och urkrokningskydd.
- Ladda lyften när den inte används eller minst varje natt.
- Bruksanvisning ska finnas vid lyften.
- Planera lyftet innan Ni börjar.
- Prova ut lämplig inställning på lyftbanden till lyftselen. Kroka först på lyftbanden från selens huvuddel sedan bendelen.
- Höj sängens huvudända och sänk sedan sängen.
- Kontrollera att lyftbanden är uppsträckta ordentligt och att lyftselen sitter rätt innan vårdtagaren lyfts från underlaget.
- Lyft aldrig högre eller längre sträckor än vad som är nödvändigt.
- Lås aldrig hjulen på lyften under ett lyft, men vid lyft från golv ska lyften låsas om brukarens huvud ligger mot lyften.
- Kontrollera lyftbygelns vid nedsänkning, akta pannan!
- Kontrollera alltid sömmar och band på lyftselen efter tvätt.
- Informera om hur lyftselen ska appliceras och märk upp utprovade inställningar på lyftbanden.
- Kontakta arbetsterapeut om lyftselen inte sitter bra på patienten längre, för eventuellt byte av modell eller storlek.
- Förskrivande arbetsterapeut bedömer om en eller två personer krävs vid lyftet och dokumenterar detta i arbetsterapijournal och utprovningsprotokoll. Kontaktperson dokumenterar i genomförandeplan.
- Fyll i utprovningsprotokoll, sätt upp på vårdtagarens rum samt bifoga en kopia till kontaktpersonen.
- Fäst blanketten "Information om personlyft" på lyften.
- All personal som hanterar lyft i Örebro Kommun skall ha genomgått utbildning för lyftkörkort.