



ÖREBRO

## Checklista till förskrivare vid information om uppresningslyft

- Användande av lyft kräver bedömning av arbetsterapeut.
- Lyftvästen ska alltid provas ut individuellt.
- Lyftens funktioner visas; Höj- och sänkning, breddning, nödstopp, nödsänkning, och urkrokningskydd.
- Ladda lyften när den inte används eller minst varje natt.
- Bruksanvisning samt ”information om uppresningslyft” ska finnas på lyften.
- Planera lyftet innan ni börjar.
- Placera lyftvästen på vårdtagaren innan lyften körs fram.  
Ställ in höjd och djup på underbensstödet. Lämplig höjd är under knäskålen.
- Fäst och spänn vadbandet.
- Prova ut lämplig inställning på lyftband och eventuella ögleband till lyftvästen.
- Kör aldrig uppresningslyften längre sträckor än vad som är nödvändigt.
- Kontrollera att lyftbanden är uppsträckta ordentligt och att lyftselen sitter rätt innan vårdtagaren reses från underlaget.
- Kontrollera alltid sömmar och band på lyftväst efter tvätt.
- Kontakta arbetsterapeut om lyftvästen inte sitter bra på patienten längre, för eventuellt byte av modell eller storlek.
- Förskrivande arbetsterapeut bedömer om en eller två personer krävs vid lyftet och dokumenterar detta i arbetsterapijournal och utprovningssprotokoll. Kontaktperson dokumenterar i genomförandeplan.
- Fyll i utprovningssprotokoll, sätt upp på vårdtagarens rum samt bifoga en kopia till kontaktpersonen.
- All personal som hanterar lyft i Örebro Kommun skall ha genomgått utbildning för lyftkörkort.